


→ MECTRON PIEZOSURGERY®

НОВАЯ ТЕХНИКА ЗАКРЫТОГО СИНУС-ЛИФТИНГА


PIEZO-LIFT

→ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДОСТУПЕ ЧЕРЕЗ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ГРЕБЕНЬ

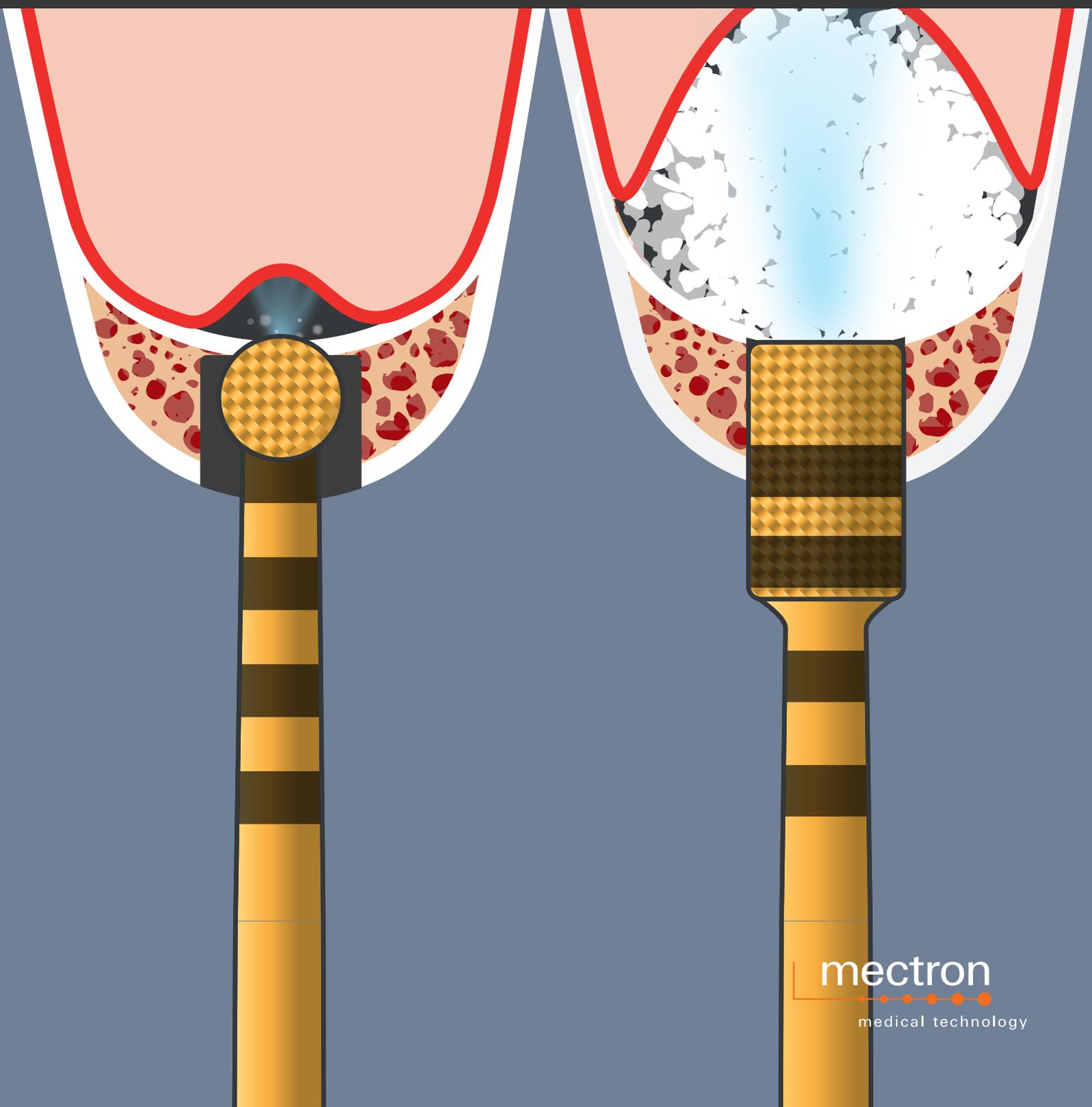


mectron
medical technology


PIEZO-LIFT BY TOMASO VERCELLOTTI

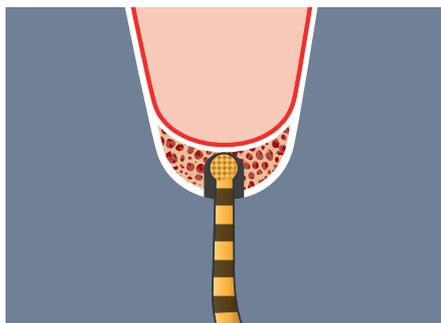


1 PL1 – прохождение к дну верхнечелюстной пазухи

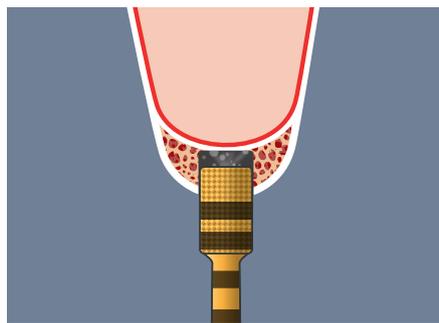


2 PL3 – придание цилиндрической формы

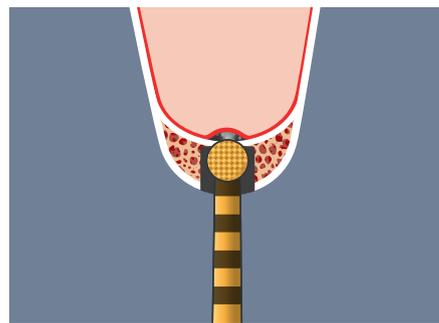

3 PL2 – открытие доступа

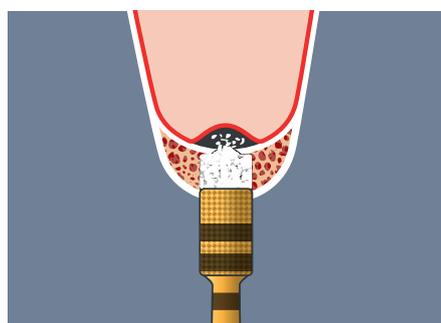

4 PL3 – паковка материала с сопутствующим эффектом кавитации

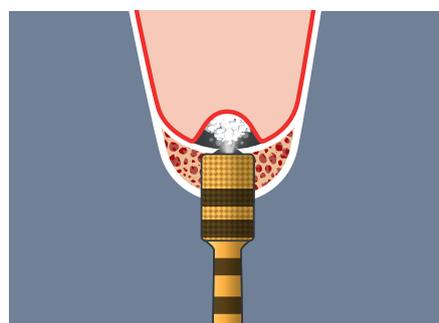


5 PL3 – поднятие мембраны



6 PL1 – удаление остаточного костного кольца



7 PL3 – паковка с уплотнением графта

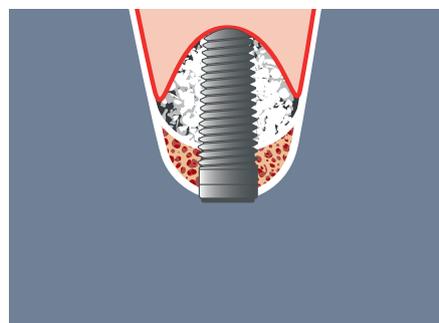

8 постановка имплантата






стандарт опция

Стандартные насадки PL1, PL2, PL3
ОПЦИОНАЛЬНО IM2P и P2-3

NOTES

- Идеальными условиями для проведения процедуры является остаточная толщина гребня от 2 до 5 мм.
- Настройки аппарата:
 - мощность: cortical
 - ирригация: уровень 2 для PL1; уровень 1 для PL2 и PL3; манипуляция на шаге 7 с насадкой PL3 выполняется без ирригации.
- Рентген-контроль рекомендован после этапов 1 и 5.
- После этапа 3 следует провести тест на целостность мембраны; следовательно, выполнить пробу Вальсальвы.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ С ТЕХНИКОЙ PIEZO-LIFT

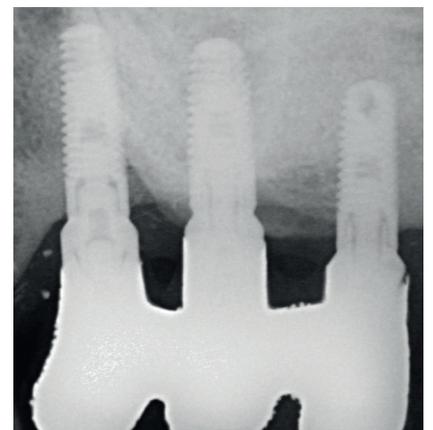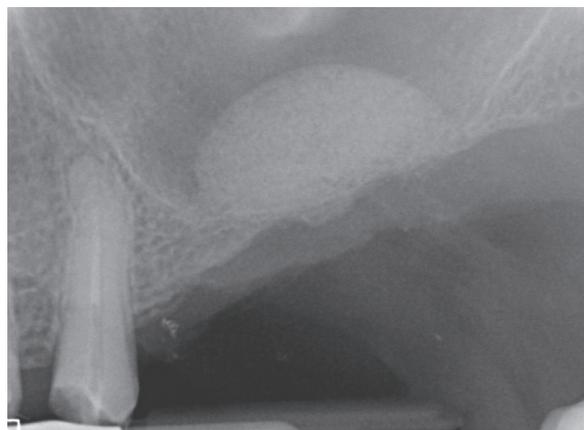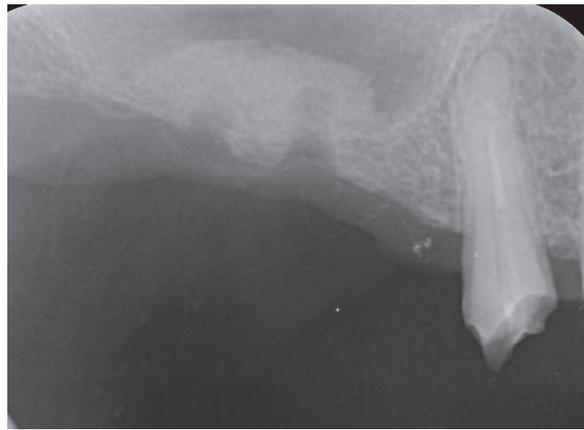


Исходная ситуация


Состояние синуса


2 года наблюдения

ДНО С КОСТНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

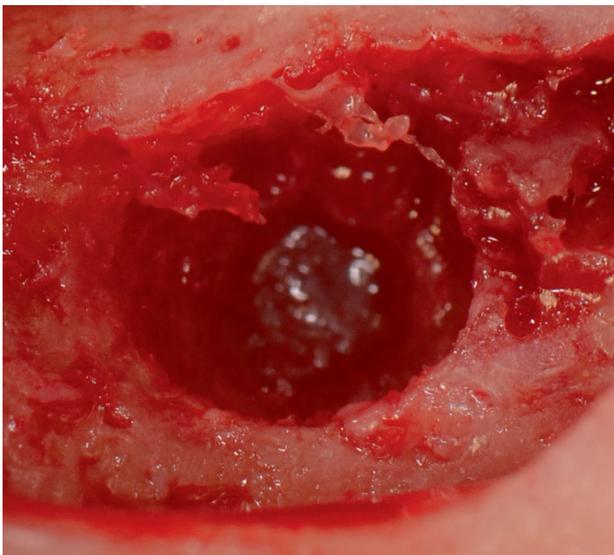

Безопасность технике Piezo-Lift обеспечивает насадка PL3, которая работает как оршень в цилиндре.

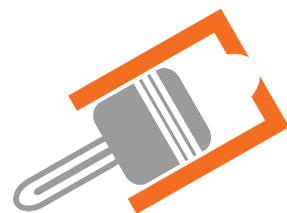


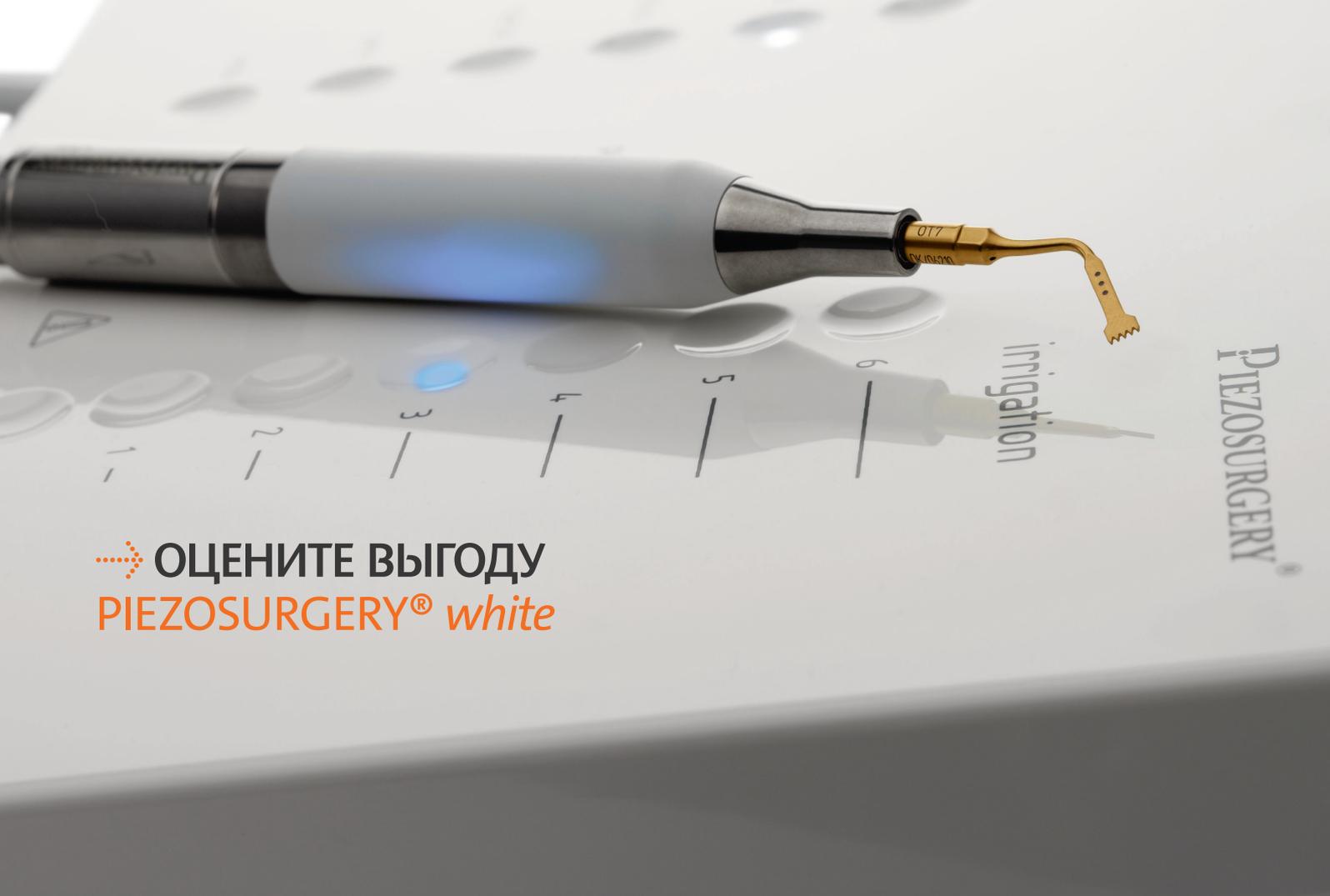

PIEZOSURGERY

ОЦЕНИТЕ ВЫГОДУ
PIEZOSURGERY® *white*

MECTRON PIEZOSURGERY®

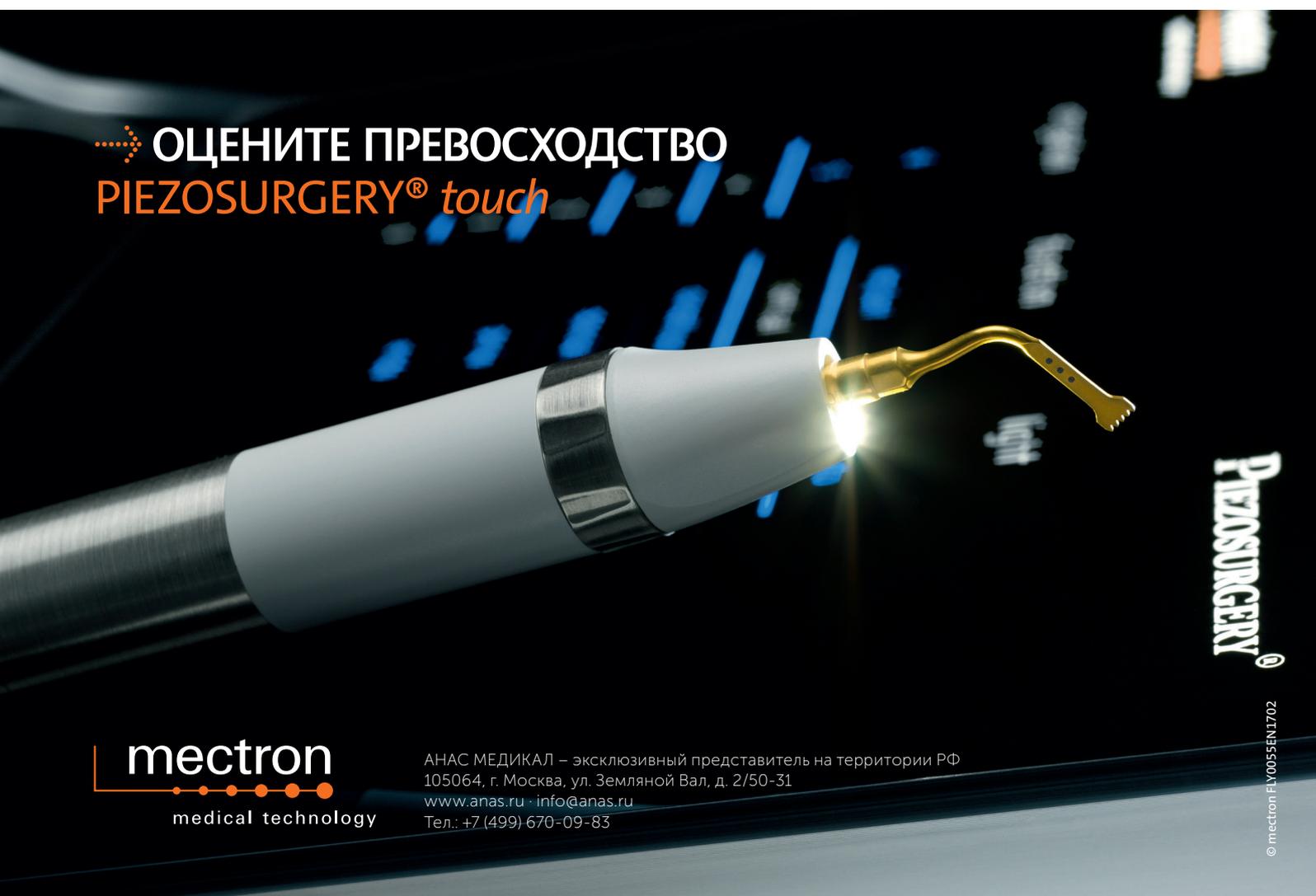

PIEZOSURGERY

ОЦЕНИТЕ ПРЕВОСХОДСТВО
PIEZOSURGERY® *touch*

mectron
medical technology

АНАС МЕДИКАЛ – эксклюзивный представитель на территории РФ
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 2/50-31
www.anas.ru · info@anas.ru
Тел.: +7 (499) 670-09-83